

Vacurex handleiding

Gebruiksaanwijzing Elektrische pomp

Inhoud van het pakket

- Elektrische pomp
- Cilinder
- Conus
- 2 Rubberen maatringen
- 3 Elastische drukringen



Vorbereiding

Scheer het overvloedige schaamhaar rond de basis van uw penis weg, dit zorgt ervoor dat er een betere vacuüm situatie gecreëerd kan worden. Gebruik altijd een goed glijmiddel om de pomp beter om de penis te kunnen schuiven.

Wanneer u de pomp alleen wilt gebruiken voor penisvergroting en niet als erectiepomp dan kunt u de stappen 2, 3 en stap 8 overslaan. Op de website van Vacurex vindt u een uitgebreidere uitleg over het gebruik van de pomp voor penisvergroting.

Stap 1: Batterijen plaatsen

Voordat u de elektrische pomp kunt gebruiken moet u batterijen in de pomp plaatsen. U dient 3 AA batterijen te plaatsen in de pomp. De batterijen worden meegeleverd met de pomp. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Stap 2: De cilinder en kegel

U dient de witte kegel op de cilinder te plaatsen. Plaats de kegel op de niet afgeronde kant van de cilinder en druk deze er goed op.

Stap 3: Elastische drukringen

U ontvangt 3 verschillende groottes drukringen van 10 – 12,5 en 15 mm. Welke drukring u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van de grootte van uw penis. Wij adviseren u altijd eerst de grootste drukring uit te proberen. Lukt het niet hiermee een goede erectie te behouden? Probeer dan de volgende keer een maat kleiner uit.

Pak de elastische drukring vast aan de zijkanten en trek deze via de kegel over de cilinder heen. Vervolgens kunt u de kegel van de cilinder verwijderen.

Stap 4: Rubberen maatringen

Bekijk welke rubberen maatring het beste bij het formaat van uw penis past en plaats deze om de ronde kant van de cilinder heen. De rubberen maatringen waarborgen de vacuümsituatie in de cilinder.

Stap 5: Pomp bevestigen

Bevestig nu de elektrische pomp aan de niet ronde kant van de cilinder.

Stap 6: Pompen

Wij adviseren u eerst te oefenen met pompen op uw hand. Plaats hiervoor de cilinder op uw

handpalm en houdt de grote blauwe knop op de pomp ingedrukt. U zult nu druk voelen van het vacuümpompen. Wanneer dit niet het geval is kunt u uw hand iets rond bewegen om te pomp beter te bevestigen. Om de vacuümsituatie weer weg te halen drukt u op de groene knop bovenop de pomp.

Wanneer overtollig schaamhaar is verwijderd en de penis, de elastische drukring en de buik rondom de penis goed zijn ingesmeerd met glijmiddel kunt u de cilinder om de penis schuiven en voorzichtig heen en weer schuiven waardoor een luchtdichte verzegeling ontstaat.

U kunt het beste pompen wanneer u staat. Controleer nog een keer of alles goed zit voordat u daadwerkelijk begint met pompen. Kijk goed of de testikels niet in de cilinder zitten.

Houdt de grote blauwe knop op de pomp vervolgens gedurende 4-5 seconden ingedrukt en laat daarna weer los. Wacht vervolgens 10 seconden af. Bent u nog niet tevreden over de bereikte erectie herhaal het pompen dan vervolgens gedurende 3 seconden en neem weer een pauze van 10 seconden. Herhaal deze laatste stap net zolang totdat u de gewenste erectie heeft bereikt.

Wanneer u wilt stoppen met pompen drukt u op de groene knop bovenop de pomp. Hierdoor verdwijnt de vacuümsituatie en kunt u de pomp van de penis verwijderen.

Stap 7: Afbinden

Wanneer het moment van erectie is bereikt schuift u de elastische drukring van de cilinder af naar u toe over uw penis heen. Op deze manier wordt voorkomen dat het bloed wegloopt uit de penis en zorgt ervoor dat de penis stijf blijft. De elastische drukring mag maximaal 30 minuten blijven zitten.

Vervolgens drukt u op de groene knop op de pomp waarna u de cilinder van de penis kunt verwijderen.

Om de drukring na de seksuele activiteit te verwijderen trekt u aan de zijkanten van de ring om de ring lossen om de penis te laten zitten. De erectie zal nu langzaam afnemen. Vervolgens trekt u de ring met een gelijkmatige beweging van de penis af.

Het kan zijn dat het niet direct lukt een erectie te krijgen met behulp van de pomp. Dit komt omdat de bloedvaten van de penis niet gewend zijn aan dit proces. Wanneer u een aantal keer oefent zult u zien dat het lukt.

Voor een uitgebreidere handleiding met foto's, verwijzen wij u naar de website www.vacurex.nl



vacuüm erectie systemen

Copyright Vacurex 2014 All Rights are reserved

www.vacurex.nl